

# CLOVER 3 Loupe électronique



## Manuel d'utilisation

# Table des matières

<b>Précautions</b>	<b>1</b>
<b>Démarrage</b>	<b>3</b>
Présentation	3
Description physique	6
Accessoires	8
Recharge de la batterie	9
Support d'écriture	12
<b>Utilisation</b>	<b>13</b>
Bouton Marche / Arrêt	13
Bip	14

<b>Grossissement</b>	<b>15</b>
<b>Mode de couleur</b>	<b>16</b>
<b>Luminosité</b>	<b>18</b>
<b>Eclairage</b>	<b>19</b>
<b>Gel d'image</b>	<b>19</b>
<b>Mémorisation</b>	<b>20</b>
<b>Arrêt automatique</b>	<b>20</b>
<b>Ré-initialisation</b>	<b>21</b>
<b>Reset hard</b>	<b>21</b>
<b>Spécifications</b>	<b>22</b>

## Précautions



Avant d'utiliser la CLOVER 3 pour la première fois, vous devez charger sa batterie.



Toujours utiliser l'appareil dans un endroit où la température est entre 10° et 35°.



Maintenez l'appareil hors de zones humides, de la pluie et d'autres sources de liquide.



Ne pas ouvrir l'appareil. La garantie sera de fait annulée.



Utilisez uniquement le chargeur fourni, risque de destruction de l'électronique de la

CLOVER 3.

# Démarrage

## Présentation

Merci d'avoir choisi la CLOVER 3

La CLOVER 3 est une loupe électronique portable avec un écran LCD de 3,5 pouces, fournissant des images nettes et claires qui sont facilement visualisées avec différents niveaux d'agrandissement et mode de couleur.

La loupe peut être tenue à la main ou posée sur le document. L'image est alors grossie et peut également être gelée pour une visualisation ultérieure.


La CLOVER 3 a également un support d'écriture pliant intégré.

Cette loupe est idéal pour visionner des étiquettes, des livres, des journaux et plus encore.








## Description physique

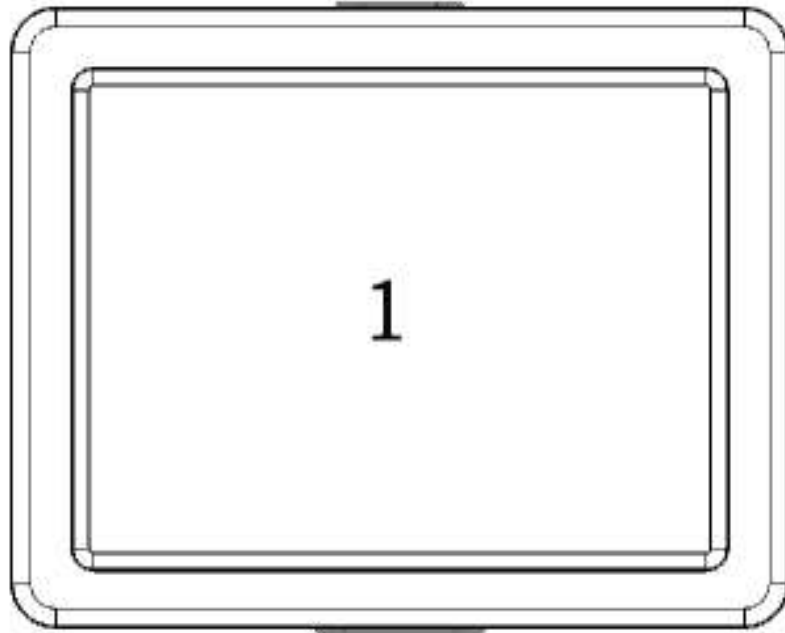

- 1. Ecran
- 3. LED

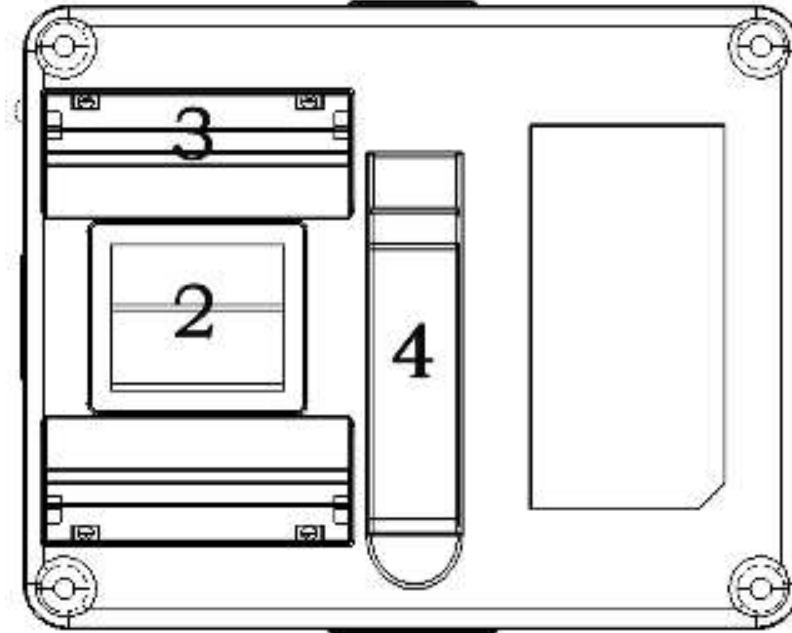


- 2. Camera
- 4. support écriture

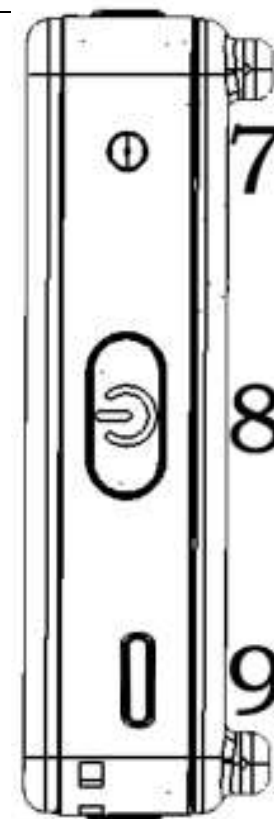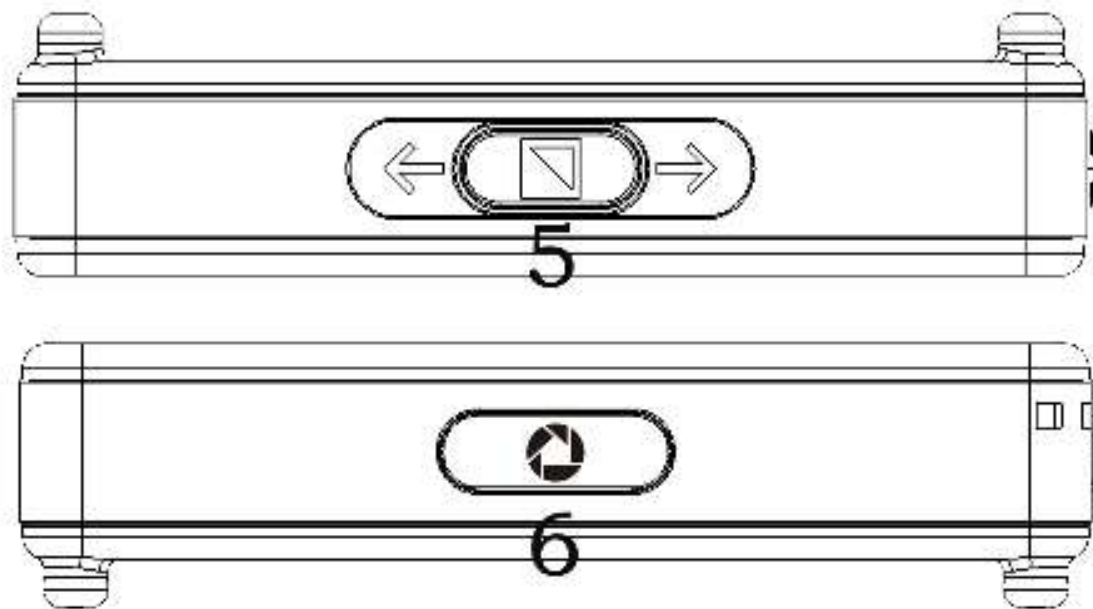


- 5. Zoom & Mode
- 6. Gel d'image
- 9. Prise USB type-C

- 7. LED de charge
- 8. Marche / Arrêt

# Accessoires

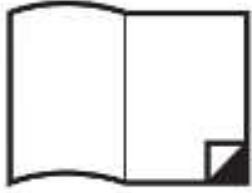


Manuel

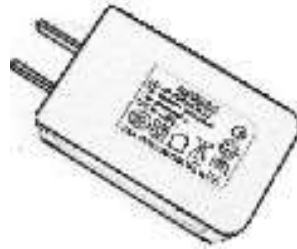

Chargeur




Chamoisine  
pour écran

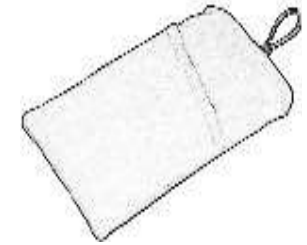

Pochette




Câble USB

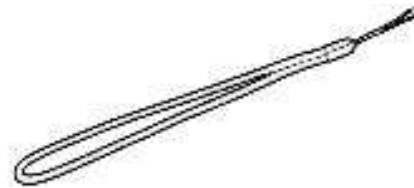

Dragone

## Recharge de la batterie

- Connecter le câble de charge au chargeur
- Connecter le câble de charge à la prise d'alimentation du CLOVER 3
- Brancher le chargeur sur une prise secteur et commencer à charger

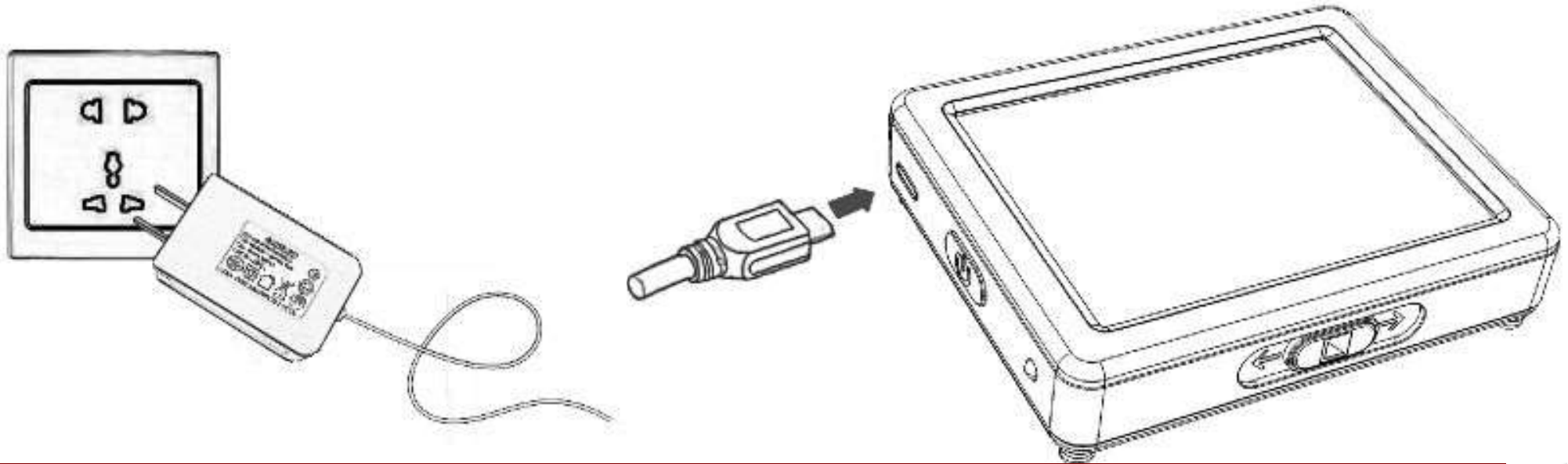

## Etat de la LED de charge


- LED Verte lors de recharge avec appareil éteint  
Une charge complète prendra environ 3 heures, et donnera une autonomie d'environ 3 heures de fonctionnement continu.
- LED Verte lors de recharge avec appareil en marche
- Quand la CLOVER 3 est allumée, chargeur non relié, le voyant on/off est vert indiquant que la batterie est pleine et rouge quand la batterie est

presque vide. Quand la lumière rouge commence à clignoter, vous devrez charger la batterie

Vous pouvez voir à tout moment l'état de charge en pressant sur le bouton on/off.




## Support d'écriture

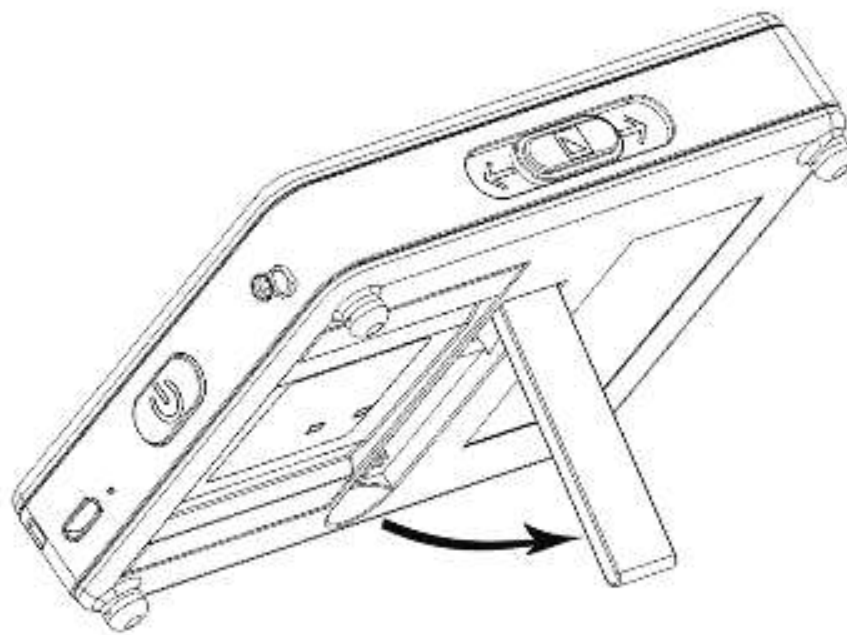Ouvrir le support placé à l'arrière de la CLOVER 3 comme décrit dans l'image ci dessous.




## Utilisation

### Bouton Marche / Arrêt

- Appuyez sur  pendant 3 secondes pour mettre en marche.
- Appuyez sur  pendant 3 secondes pour arrêter.
- Appuyez sur  pour vérifier la charge de la batterie et accéder aux différentes informations ci-dessous.




- Appuyez sur  en combinaison avec d'autres boutons pour accéder aux fonctions complémentaires.




## **Bip**

- A l'allumage et à l'extinction
- Lors de l'utilisation de tous les boutons
- Indique une batterie déchargée

## Activation des bip

Appuyer sur  pendant 3 secondes pour mettre en marche ou arrêter les bips.

## Grossissement

- Pousser vers la gauche ou vers la droite le bouton Zoom & Mode    pour modifier le grossissement.
- Maintenir poussé pour zoomer en continu.

- Posé à plat sur le document, le taux d'agrandissement est de : 3.8x – 16x

## **Mode de couleur**

Un mode de couleur est une combinaison de couleurs prédéfinie. Le mode couleurs naturelles est préférable pour les images, les cartes, tandis que les modes en fort contraste avec 2 couleurs sont optimum pour la lecture.

- Appuyer sur Zoom & Mode pour sélectionner le mode de couleur suivant.

- Maintenir appuyé pendant 2 secondes Zoom & Mode    pour revenir directement au mode couleurs naturelles

La liste des modes contient 10 combinaisons :

Couleurs naturelles

noir/Blanc

Blanc/bleu

Jaune/bleu

Vert/noir

Blanc/noir

jaune/noir









Bleu/blanc

Bleu/jaune

Rouge/noir

## Luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran



- Appuyer simultanément sur Marche / Arrêt   
et pousser à droite le Zoom & Mode     
pour augmenter le niveau
- Appuyer simultanément sur Marche / Arrêt   
et pousser à gauche le Zoom & Mode     
pour diminuer le niveau

## Eclairage

- Appuyez sur  et  pour arrêter ou mettre en marche les Leds (utile sur papier glacé)

## Gel d'image

Cette fonction permet de geler une image sur l'écran et ensuite de grossir/réduire les textes ou de changer le mode de couleur.

- Appuyez sur  pour capturer une image
- Appuyez une nouvelle fois sur  pour revenir au mode loupe





## **Mémorisation**

La CLOVER 3 mémorise automatiquement tous les réglages à l'extinction et les ré-utilise à la mise en marche suivante.






## **Arrêt automatique**

La CLOVER 3 s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes si elle n'est pas utilisée.

## Ré-initialisation

Appuyez simultanément sur  et Zoom & Mode button    pendant 5 secondes pour revenir à la configuration d'usine. la CLOVER 3 s'éteint alors.

## Reset hard

Quand la CLOVER 3 est bloquée, appuyer sur Marche / Arrêt  & Gel d'image  & Zoom & Mode    simultanément pour relancer la CLOVER 3.



## Spécifications

**Ecran:** 3.5 pouces LCD

**Taille :** 90\*72\*18mm

**Poids:** <150 grammes (Batterie comprise)

**Modes couleurs :** 10 modes

**Grossissement :** 3.8x – 16x (CLOVER posé sur le document)

**Batterie :** Lilon rechargeable & remplaçable

Environ 3 h d'autonomie,

charge complète en 3 h (de 0 à 100 %)

**Chargeur :** Port USB ; Entrée 110-240V; sortie 5V/1A





Pour nous joindre : **01 43 44 02 02**

**Email : [relation.client@accessolutions.fr](mailto:relation.client@accessolutions.fr)**

23 Rue Raspail  
94200 Ivry sur Seine