

**CLOVER 7S**  
Loupe électronique  
**Manuel d'utilisation**

## Précautions



**Avant d'utiliser CLOVER 7S pour la première fois, vous devez charger sa batterie.**



**Toujours utiliser l'appareil dans un endroit où la température est entre 10° et 35°.**



**Maintenez l'appareil hors de zones humides, de la pluie et d'autres sources de liquide.**



**Ne pas ouvrir l'appareil. La garantie sera de fait annulée.**



**Utilisez uniquement le chargeur fourni, risque de destruction de l'électronique du CLOVER 7S.**

## Démarrage


Merci d'avoir choisi CLOVER 7S

CLOVER 7S propose différentes fonctions :


- Vision de près pour lire livres, journaux, etc.
- Vision de loin pour une plaque de rue, transport, tableau.
- Fonction lignage et fenêtrage pour suivre confortablement un morceau de texte ou une ligne précise.
- Fonction navigation à l'aide du joystick utilisable après agrandissement et aussi après capture d'image.

## CLOVER 7S

**Mode pupitre**

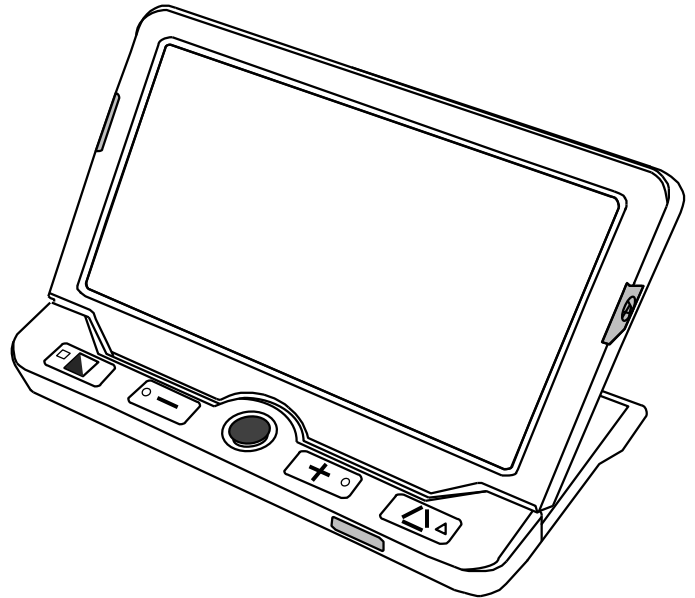

## Composition

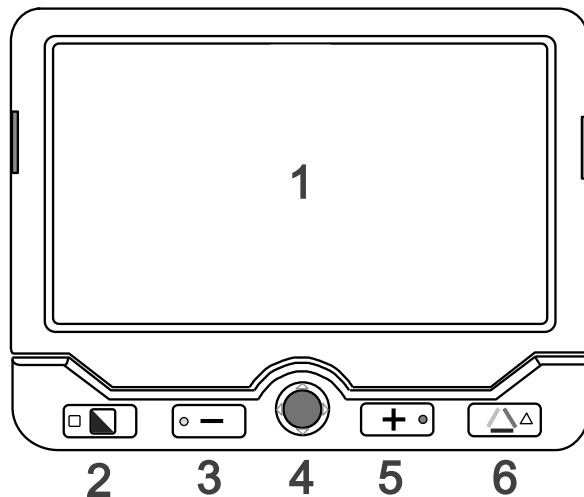


**1. Ecran LCD**  
**4. Joystick**

**2. Fort contraste**  
**5. Zoom +**

**3. Zoom -**  
**6. Couleurs naturelles**


## Arrière du CLOVER 7S

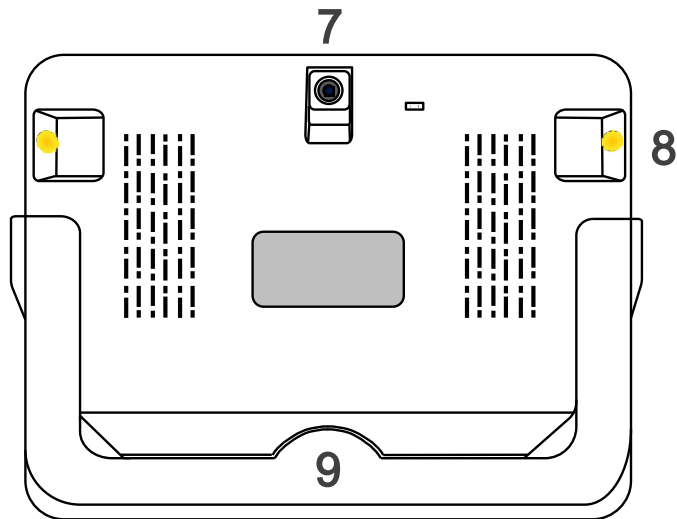

**7. Caméra arrière**

**8. LED éclairage**

**9. Pied de lecture**

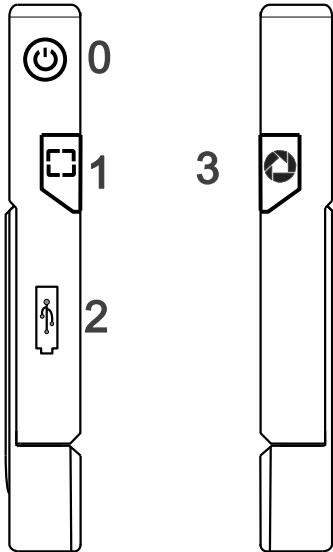

**0. Bouton marche/  
arrêt**


**1. Lignage / fenêtrage**

**2. USB Port (fonction  
non disponible en EU)**

**3. Capture image**

**4. Prise adaptateur**


**5. prise HDMI**

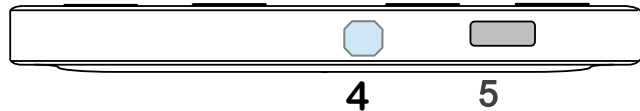

## Accessoires fournis




Manuel

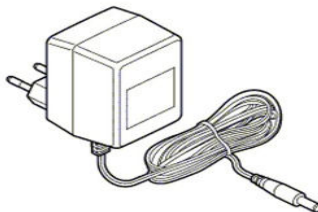


Chargeur



Chamoisine pour  
écran

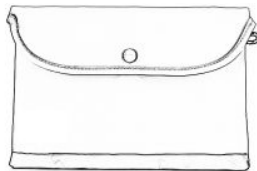

Sac de transport

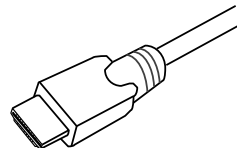

HDMI Cable



## **Charger la batterie**

Connectez le câble de charge à la prise d'alimentation du CLOVER 7S


Branchez le chargeur sur une prise secteur et commencez à charger

## **Indicateur de charge**

Une charge complète prendra environ 5 heures, et donnera une autonomie d'environ 3 heures de fonctionnement continu.

Lorsque le voyant clignote en rouge, il vous reste 10 minutes d'autonomie.

Quand le CLOVER 7S est en charge avec le chargeur, le voyant vert (on/off) indique la charge, ce voyant s'éteint après charge complète

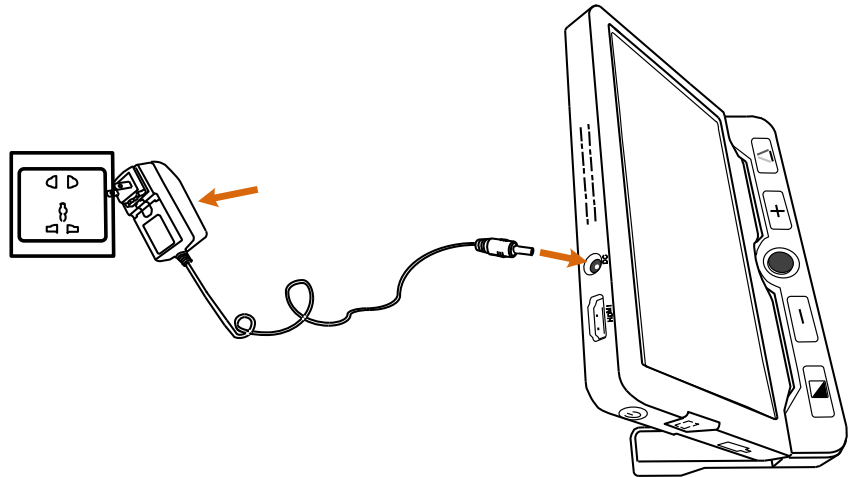

Quand le CLOVER 7S est allumée, chargeur non relié, le voyant on/off est vert indiquant que la batterie est pleine et rouge quand la batterie est presque vide. Quand la lumière rouge commence à clignoter, vous devrez charger la batterie


Vous pouvez voir à tous moment l'état de charge en pressant sur le bouton on/off.

## **Support de lecture**

Le support pliable est prévu pour permettre de lire et d'écrire par l'arrière du CLOVER 7S.


Lorsque le CLOVER 7S est ouvert la camera est actionnée en vision de près.

Lorsque le CLOVER 7S est fermé la camera passe automatiquement sur la position vision de loin.

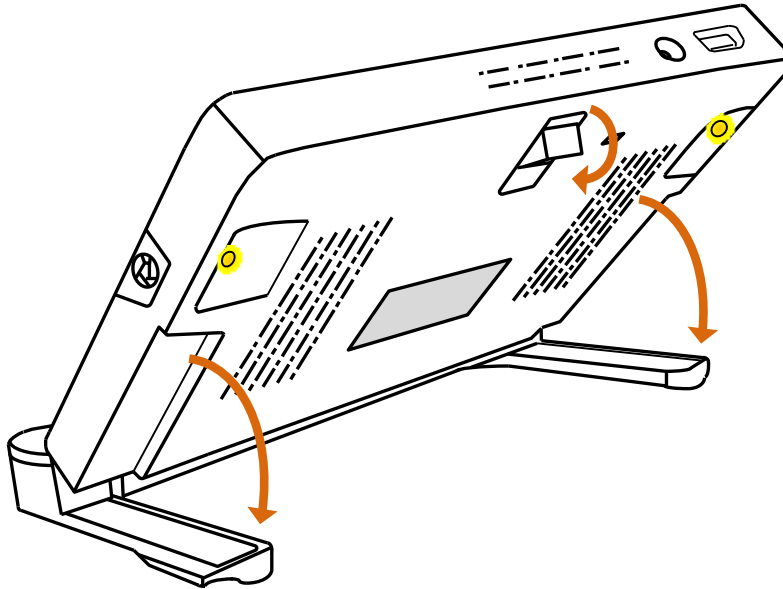


## Utilisation

### Bouton Marche/Arrêt

Appuyez sur  pendant 3 secondes pour mettre en marche ou arrêter.

Appuyez sur  pour vérifier la charge de la batterie et accéder au différentes informations ci-dessous.

Appuyez sur  en combinaison avec d'autres boutons pour accéder aux fonctions complémentaires.

### Bip (signaux sonores)



A l'allumage et à l'extinction du CLOVER 7S

Lors de l'utilisation de tous les boutons

Indique une batterie déchargée


Lorsque le CLOVER 7S s'arrête automatiquement

### **Activation des bips :**

Appuyez sur  et  pour mettre en marche ou arrêter les bips.

### **Agrandir ou diminuer l'image**

Appuyez sur  pour agrandir par paliers, ou gardez le doigt sur la touche pour agrandir en continu.


Appuyez sur  pour diminuer par paliers, ou gardez le doigt sur la touche pour diminuer en continu.

Le taux d'agrandissement est de 2.4x à 28x lorsque le CLOVER 7S est utilisé en position pupitre.

## Choix des Modes couleurs

Appuyez sur le Mode fort contraste  pour choisir une des combinaisons de couleurs.

Appuyez sur le bouton  pour revenir au mode couleurs naturelles.

Dans un des modes fort contraste, un appui de 3 secondes sur le bouton fait apparaître  et ajoute cette combinaison de couleur à la liste simplifiée.

De nouveau , un appui de 3 s active la liste étendue .

**Liste simplifiée :**

Blanc/noir  
Combinaison favorite

Noir/Blanc  
Inverse combinaison  
favorite

**Liste étendue (18 modes)**

Blanc/noir  
Jaune/noir  
Blanc/bleu  
Jaune/bleu  
Vert/noir  
Violet/noir

Noir/blanc  
Noir/jaune  
Bleu/blanc  
Bleu/jaune  
Noir/vert  
Noir/violet







Bleu/noir  
Blanc/vert  
Blanc/rouge

Noir/bleu  
Vert/blanc  
Rouge/noir



## Luminosité



Vous pouvez ajuster la luminosité

Appuyez sur  et  : augmente la luminosité


Appuyez sur  et  : diminue la luminosité

## **LED éclairage**

Appuyez sur  et  pour arrêter ou mettre en marche les Leds (utile sur papier glacé)

Appuyez sur  et  pour choisir entre la led de gauche ou celle de droite.


## **Autofocus**

Appuyez sur  pour bloquer l'autofocus, ce qui est utile par exemple lors de l'écriture.

Appuyez de nouveau sur  pour activer l'autofocus

## **Gel d'image**


Cette fonction permet de geler une image sur l'écran et ensuite de grossir/réduire les textes ou de changer le mode de couleur.

Appuyez sur  pour capturer une image

Vous pouvez utiliser le Joystick  pour vous déplacer dans votre image.

Appuyez une nouvelle fois sur  pour revenir au mode loupe.


## **Stockage d'image**



Quand une image est gelée, appuyez sur  durant 3 secondes pour l'enregistrer.

18 images peuvent être mises en mémoire.



Quand la mémoire est pleine vous devez supprimer des images pour en sauvegarder de nouvelles (l'icône Full ICON apparaît).



### **Pour voir les images sauvegardés**


Appuyez sur  durant 3 secondes.

Utilisez le Joystick  pour sélectionner l'image voulue.  
Appuyez à nouveau sur  pour afficher l'image.  
Vous pouvez alors voir l'image choisie, naviguer et agrandir comme décrit au-dessus.

Appuyez sur  pour revenir à la sélection d'image.

Appuyez sur  pour supprimer une image, appuyez à nouveau sur  pour confirmer la suppression, appuyez sur un autre bouton pour annuler.

Appuyez sur  durant 5 secondes pour supprimer toutes les images, appuyez ensuite sur  une nouvelle fois pour confirmer, pressez sur un autre bouton pour annuler.

Appui long sur  durant 3 secondes pour revenir au mode loupe.

## Lignage / fenêtrage


Appuyez sur  pour obtenir soit la ligne, soit le fenêtrage :

Lignage horizontal (adaptable haut/bas avec Joystick)

Lignage vertical (adaptable gauche/droite avec Joystick)


Fenêtrage réglable en position et en taille.


Aucun lignage ni fenêtrage

Vous pouvez utiliser le Joystick  pour changer la hauteur de la ligne de haut en bas. En mode fenêtrage de haut en bas pour déplacer la ligne, de droite à gauche pour agrandir ou diminuer la fenêtre.

Appuyez sur  pour revenir au mode normal

## Localisateur






Afin de dé-zoomer rapidement appuyez 2 secondes sur  et maintenez appuyé.

Déplacez alors la loupe à votre gré puis relâchez le bouton  .  
Le grossissement de l'image revient alors à sa valeur avant l'appel du localisateur.

## Naviguer dans l'image agrandie

Sur une image agrandie, utilisez le Joystick  pour naviguer dans votre document.

Appuyez sur  et  simultanément pour recentrer l'image.

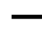Afin d'aller directement au début ou à la fin de l'image, appuyez sur  et déplacez le joystick  vers la gauche ou la droite. La vitesse de défilement est ajustable en poussant le joystick  vers le haut et en appuyant sur  ou .

## **Mémorisation des derniers modes choisis**

Le CLOVER 7S mémorise automatiquement tous les réglages.


## **Arrêt automatique**

Le CLOVER 7S s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes s'il n'est pas utilisé.





## Sortie Hdmi

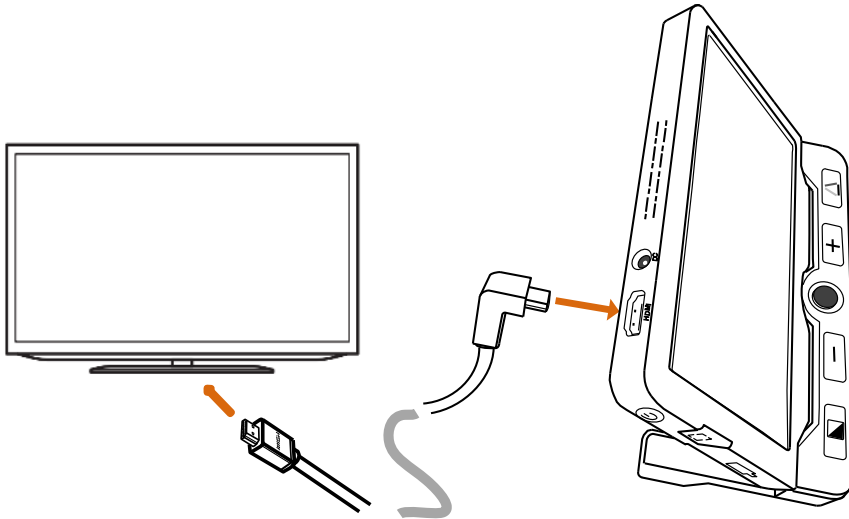
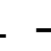

Le CLOVER peut se connecté sur un écran externe, un télévision, un rétro-projecteur, grâce à un cable Hdmi.



## **Réinitialisation**

Appuyez simultanément sur  et  pendant 5 secondes pour revenir à la configuration d'usine (les images enregistrées sont conservées). Le CLOVER 7S s'éteint alors.

## **Reset (en cas de blocage)**

Si l'unité ne fonctionne pas correctement procédez à un reset, pressez  +  +  en même temps (les images enregistrées sont conservées).

## Spécifications

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Ecran:</b>         | 7 pouces, LCD  |
| <b>Camera:</b>        | 13 M Pixels / résolution 1920 * 1080                           |
| <b>Taille:</b>        | 188 x 138 x 21 mm  |
| <b>Poids:</b>         | 420 grammes  |
| <b>Mode couleurs:</b> | Couleur naturelle, Mode favoris, ou 18 modes à fort contraste  |
| <b>Grossissement:</b> | 2,4x à 28x CLOVER 7S   |
| <b>Batterie:</b>      | Environ 3 h d'autonomie, charge complète en 5 h (de 0 à 100 %) |
| <b>Adaptateur:</b>    | Entrée: 110-240V; sortie: 5V/3A                                |

**Produit Garantie 2 ans**

Pour nous joindre : **01 43 44 02 02**

**Email : [relation.client@accessolutions.fr](mailto:relation.client@accessolutions.fr)**

23 Rue Raspail  
94200 Ivry sur Seine