

Commandes iOS pour les blocs-notes Seika - Accessolutions

Documentation des commandes iOS VoiceOver utilisables avec les bloc-notes Seika 16 (mini), 24 et 40 (V6)

Copyright © Accessolutions

Dernière révision: 07/10/2020

Introduction

Merci d'avoir fait l'acquisition d'un bloc-notes Braille Seika. Il s'agit d'un bloc-notes portable équipé de 16, 24 ou 40 cellules braille est d'un clavier Perkins. Avant de l'utiliser, nous vous recommandons de lire attentivement le manuel. Si, au cours de votre lecture, vous rencontrez certains points manquant de clarté, des erreurs ou encore des omissions, n'hésitez pas à nous contacter.

Note

Toute reproduction de ce document, qu'elle soit totale ou partielle, est strictement interdite. Par ailleurs, son contenu est susceptible de faire l'objet de modifications ou de révisions sans pré-avis.

Raccourcis pour interagir avec un téléphone Android avec TalkBak et BrailleBack

Commandes Braille universelles

- Point 1 + Barre d'espace: Aller à l'élément précédent
- Point 4 + Barre d'espace: Aller à l'élément suivant
- Point 3 + Barre d'espace: Aller à l'élément précédent à l'aide du réglage du rotor
- Point 6 + Barre d'espace: Aller à l'élément suivant à l'aide du réglage du rotor
- Point 2 + point 3 + Barre d'espace: Sélectionner le réglage précédent du rotor
- Point 5 + point 6 + Barre d'espace: Sélectionner le réglage suivant du rotor
- Point 1 + Point 2 + Point 3 + Barre d'espace: Se déplacer jusqu'au premier élément
- Point 4 + Point 5 + Point 6 + Barre d'espace: Se déplacer jusqu'au dernier élément
- Point 1 + Point 2 + Point 3 + Point 5 + Barre d'espace: Lire la page à partir de l'élément sélectionné
- Point 2 + Point 4 + Point 5 + Point 6 + Barre d'espace: Lire la page depuis le début
- Point 1 + Point 2 + Point 5 + Barre d'espace: Activer le bouton principal
- Point 2 + Point 3 + Point 4 + Barre d'espace: Aller à la barre d'état
- Point 3 + Point 4 + Point 5 + Barre d'espace: Activer le bouton d'augmentation du volume
- Point 1 + Point 2 + Point 6 + Barre d'espace: Activer le bouton de diminution du volume
- Point 1 + point 2 + Barre d'espace: Activer le bouton Précédent, le cas échéant
- Point 1 + Point 4 + Point 6 + Barre d'espace: Activer la touche d'éjection
- Point 7 + barre d'espace: Activer la touche de suppression
- Point 1 + Point 4 + Point 5 + Barre d'espace: Activer la touche de suppression
- Point 8 + Barre d'espace: Activer la touche Retour
- Point 1 + Point 5 + Barre d'espace: Activer la touche Retour
- Point 2 + Point 3 + Point 4 + Point 5 + Barre d'espace: Activer la touche de tabulation
- Point 1 + Point 2 + Point 3 + Point 4 + Point 5 + Point 6 + Barre d'espace: Activer/désactiver le rideau d'écran
- Point 1 + Point 2 + Point 3 + Point 4 + Barre d'espace: Mettre en pause ou poursuivre la lecture
- Point 1 + Point 3 + Point 4 + Barre d'espace: Activer/désactiver la lecture
- Point 3 + Point 4 + Barre d'espace: Énoncer le numéro de page ou le nombre de rangs affichés
- Point 3 + Point 4 + Point 5 + Point 6 + Barre d'espace: Faire défiler d'une page vers le haut
- Point 1 + Point 4 + Point 5 + Point 6 + Barre d'espace: Faire défiler d'une page vers le bas
- Point 2 + Point 4 + Point 6 + Barre d'espace: Faire défiler d'une page vers la gauche
- Point 1 + Point 3 + Point 5 + Barre d'espace: Faire défiler d'une page vers la droite
- Point 2 + Point 3 + Point 6 + Barre d'espace: Désélectionner le texte
- Point 2 + Point 5 + Point 6 + Barre d'espace: Sélectionner le texte
- Point 2 + Point 3 + Point 6 + Barre d'espace: Tout sélectionner
- Point 1 + Point 3 + Point 4 + Point 6 + Barre d'espace: Coupure
- Point 1 + Point 4 + Barre d'espace: Copier
- Point 1 + Point 2 + Point 3 + Point 6 + Barre d'espace: Coller
- Point 1 + Point 3 + Point 5 + Point 6 + Barre d'espace: Annuler la saisie

- Point 2 + Point 3 + Point 4 + Point 6 + Barre d'espace: Rétablir la saisie
- Point 2 + Barre d'espace: Déplacer la fenêtre en braille vers la gauche
- Point 5 + Barre d'espace: Déplacer la fenêtre en braille vers la droite
- Point 1 + Point 3 + Point 4 + Point 5 + Barre d'espace: Afficher ou masquer l'historique des annonces
- Point 1 + Point 2 + Point 4 + Point 5 + Barre d'espace: Alternner entre l'affichage du mode braille contracté et non contracté
- Point 1 + Point 7 + Barre d'espace: Aller au conteneur précédent (iPad uniquement)
- Point 4 + Point 7 + Barre d'espace: Aller au conteneur suivant (iPad uniquement)