



MASQUE DE VISION NUMÉRIQUE AVANCÉE

**"Nous avons relevé la barre de l'intelligence
au génie pur. Dès que vous porterez ce
miracle des temps modernes, vous vous
demanderez en souriant.....**

"Qu'est-ce qui vient de se passer !!?"

John Palmer, Président

Table des matières

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?	3
INTRODUCTION	4
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ	5
UTILISATION DU PATRIOT VIEWPOINT	6
Au démarrage, un écran d'avertissement	7
PAVÉ DE COMMANDE TACTILE DU CASQUE	8
Modes de couleur	9
MODE LECTURE	10
CARACTÉRISTIQUES DU CASQUE - ILLUSTRÉES	11
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE	12
L'ARRÊT AUTOMATIQUE PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉ	13
UTILISATION DE VOTRE VIEWPOINT PATRIOT	14
ZOOM	14
LUMINOSITÉ	14
COULEURS	14
LIRE	14
MENU DES PARAMÈTRES AVANCÉS	15
Sous-menu FONDS COLORES	16
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	17
Instructions de nettoyage pour votre Patriot VIEWPOINT :	19
Environnement d'utilisation optimale de la batterie	21
CONTACTEZ-NOUS	22



QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

- **Casque d'écoute**
- **Adaptateur CA**
- **Cordon de charge**
- **Oreillettes**
- **Manuel utilisateur**
- **Mallette de transport**



INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir acheté le Patriot VIEWPOINT. Nous avons créé ce produit remarquable en combinant des matériaux de pointe de haute qualité avec notre logiciel développé sur mesure pour produire une expérience sensorielle visuelle sans précédent et inégalée. Pesant un peu plus d'un kilo, votre Patriot VIEWPOINT est léger et peut être porté confortablement pendant de longues périodes. Nous immergeons votre vision, éliminons les reflets extérieurs et composons votre champ de vision périphérique.

Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons placé la barre encore plus haut en vous offrant l'avantage d'entendre les caractères d'imprimerie lus à haute voix. Cela réduit la fatigue visuelle et permet une compréhension plus rapide.

Vous pouvez utiliser votre Patriot VIEWPOINT pour voir la télévision, le théâtre, les événements sportifs, les musées, les croisières, les safaris, votre famille, travailler sur des projets artistiques, des tâches à distance, des menus, des panneaux, voir des partitions de musique, jouer d'un instrument, lire des écrans d'ordinateur, des tablettes, des smartphones, et bien plus encore. Imaginez les possibilités !

Patriot VIEWPOINT...plus qu'il n'y paraît !

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Nous avons conçu le Patriot VIEWPOINT pour qu'il puisse être utilisé en position assise ou debout, sans bouger.

Pour éviter de trébucher ou de tomber accidentellement, il est impératif de ne pas bouger lorsque vous portez le casque, car il englobe l'ensemble de votre champ visuel. N'essayez même pas de marcher lorsque vous portez le casque Patriot VIEWPOINT.

NE PAS UTILISER COMME
DISPOSITIF DE MOBILITÉ
NE PAS BOUGER, MARCHER OU
SE METTRE EN MOUVEMENT

NE PAS ESSAYER DE CONDUIRE
QUOIQUE CE SOIT

UTILISATION DU PATRIOT VIEWPOINT

Avant de mettre l'appareil en marche, prenez le temps de placer le Patriot VIEWPOINT sur votre tête, au-dessus de vos yeux, de tirer sur les sangles élastiques et de les ajuster à l'aide des sangles en velcro, en vous assurant qu'il est confortablement ajusté sur votre visage et qu'il est bien équilibré sur le dessus de votre tête et sur les côtés.

Remarque : si vous portez des lunettes correctrices, gardez-les et portez le Patriot VIEWPOINT par-dessus vos lunettes correctrices. Dans le cas improbable où vos lunettes seraient trop grandes pour entrer dans le masque, nous vous recommandons de porter des lunettes correctrices plus petites, adaptées à l'appareil.

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton rouge situé sur le dessus et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce qu'il vibre, puis relâchez-le.



Au démarrage, un écran d'avertissement

Vous arriverez sur un message d'AVERTISSEMENT (image ci-dessous), il est impératif pour votre sécurité et celle des autres que vous n'utilisiez cet appareil qu'en position assise ou debout. Ne pas marcher, se déplacer ou essayer de conduire.

WARNING

**The Patriot® ViewPoint
is not intended for driving or mobility.**

Press any button to continue

ATTENTION

**Le masque VIEWPOINT Patriot ne doit pas être utilisé
pour se déplacer ou pour conduire.**

Appuyer sur un bouton pour continuer

Tout en regardant ce message d'AVERTISSEMENT, passez la main au-dessus de la visière et localisez la molette d'écart pupillaire, réglez-la pour obtenir la vue la plus claire possible tout en regardant l'image à l'écran. Remarque : l'appareil n'a pas besoin d'être réajusté si vous êtes le seul utilisateur.

Pour continuer au-delà du message
d'avertissement, cliquez sur le bouton
COULEURS à droite au-dessus du
pavé de commande tactile.



PAVÉ DE COMMANDE TACTILE DU CASQUE

Toutes les commandes nécessaires se trouvent sur le côté droit du Patriot VIEWPOINT.



Il y a un pavé de commande tactile qui consiste en une surface lisse avec un creux au centre.

En MODE LIVE, vous pouvez balayer vers l'avant pour augmenter le zoom et vers l'arrière pour le diminuer.

Balayez vers le haut pour augmenter la luminosité et vers le bas pour la diminuer.

En MODE LECTURE, vous pouvez toujours balayer vers l'avant pour augmenter le zoom et vers l'arrière pour le diminuer. Le balayage vers le haut et vers le bas change toutefois en MODE LECTURE. Balayez vers le haut pour reculer d'une phrase, balayez vers le bas pour avancer d'une phrase.

Modes de couleur



Vous pouvez appuyer sur la touche COULEUR pour passer d'une combinaison de couleurs contrastées à une autre, comme suit :

original (couleur)

contraste élevé (couleur) : noir sur blanc, blanc sur noir, noir sur jaune, jaune sur noir, noir sur vert, vert sur noir, jaune sur bleu, bleu sur jaune, niveaux de gris

Remarque : Vous pouvez réduire le nombre d'options de sélection de couleurs de 11 à 4, ce qui est plus simple que d'avoir à passer par toutes les couleurs les moins désirables.

Pour ce faire, sélectionnez votre option favorite "couleurs non fidèles" et maintenez le bouton du mode couleur enfoncé pendant 7 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Cela réduit le nombre d'options à quatre au total, comme suit :

original (couleur)

contraste élevé (couleur) : le favori que vous avez choisi l'inverse de ce favori

MODE LECTURE



Pour lire un texte imprimé à haute voix, visez le texte et appuyez sur le bouton LIRE pour prendre une photo du document imprimé, ce qui fait passer l'appareil en MODE LECTURE.

L'appareil commence à lire à haute voix et affiche le texte à l'écran. En MODE LECTURE, un glissement vers le haut permet de lire la phrase précédente, un glissement vers le bas permet de lire la phrase suivante, un glissement vers l'arrière permet de diminuer le zoom et un glissement vers l'avant permet d'augmenter le zoom.

Une pression sur le bouton COULEUR permet de changer de couleur. Une double pression sur le centre du pavé de commande tactile met la lecture en PAUSE et une nouvelle pression permet de reprendre la lecture. En appuyant de nouveau sur le bouton de LECTURE, vous fera sortir du MODE LECTURE et retourner au MODE LIVE.


CARACTÉRISTIQUES DU CASQUE - ILLUSTRÉES



Pavé de commande tactile

Port pour écouteurs

Cordon de charge

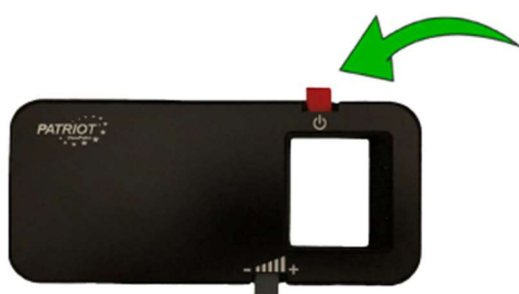

Bouton Marche / Arrêt



Bouton de volume



Bouton COULEUR



Bouton LECTURE



Prise de charge



Molette d'écartement interpupillaire

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

LIRE - appuyer pour que l'impression soit lue a haute voix

COULEURS - appuyer pour modifier les choix de couleurs

ZOOM AUGMENTER L'AGRANDISSEMENT - glisser vers l'avant

ZOOM DIMINUER L'AGRANDISSEMENT - glisser vers l'arrière

PLUS CLAIR - balayage vers le haut

PLUS FONCÉ - balayage vers le bas

ÉTAT DE LA BATTERIE - appui longue sur le pave de commande tactile pendant 20 secondes jusqu'à l'annonce de l'état de la batterie


ACCÉDER AU MENU DES RÉGLAGES - appuyer le bouton de lecture pendant 7 secondes

L'image ci-dessous illustre l'emplacement du port de charge rapide USB-C. Celui-ci peut être branché sur le chargeur secteur fourni pour recharger l'appareil. Remarque : le Patriot VIEWPOINT peut être utilisé pendant le chargement, mais la batterie s'épuise plus rapidement qu'elle ne peut se charger, c'est pourquoi l'unité doit être mise hors tension pour se charger complètement.




L'ARRÊT AUTOMATIQUE PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉ

Le VIEWPOINT Patriot est réglé pour s'éteindre automatiquement si l'appareil est allumé et reste immobile pendant 15 minutes. Si cette fonction est activée, veillez à bouger la tête au moins une fois toutes les 14 minutes, sinon vous entendrez un bip sonore et la photo suivante s'affichera à l'écran pendant une minute, puis l'appareil s'éteindra si vous ne bougez pas la tête.

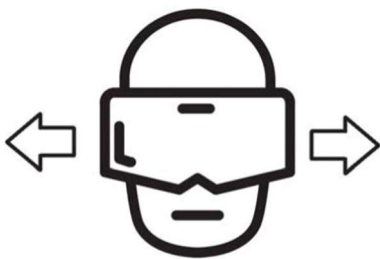

Cette fonction peut être désactivée en accédant au menu en maintenant le bouton LECTURE enfoncé pendant 7 secondes, puis en naviguant vers le bas sur le pavé de commande tactile. Une fois que vous avez mis en surbrillance "Arrêt en cas d'inactivité", appuyez simplement sur le bouton LECTURE. Balayez ensuite vers le haut ou vers le bas et appuyez sur le bouton LECTURE pour sélectionner votre préférence. Le bouton COULEUR permet de revenir en arrière dans le menu. Continuez à appuyer sur le bouton COULEUR jusqu'à ce que vous quittiez le menu.

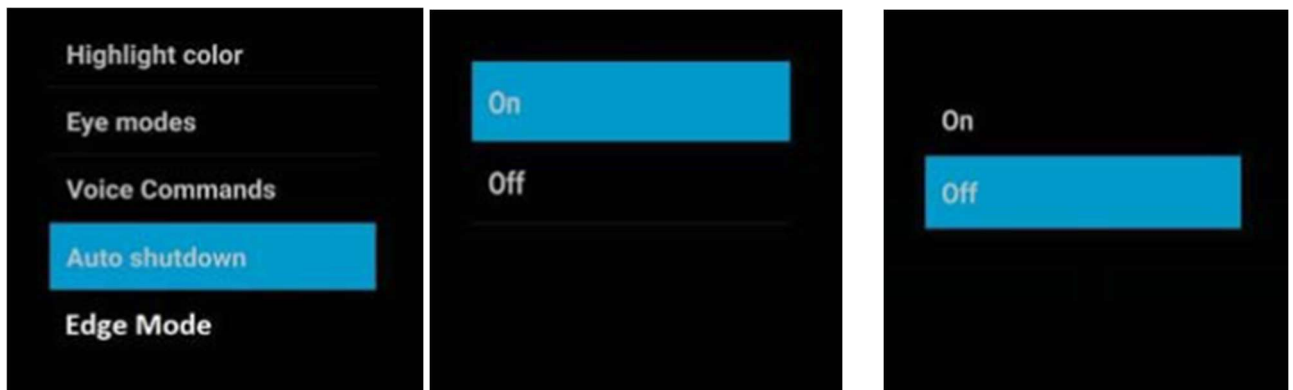

UTILISATION DE VOTRE VIEWPOINT PATRIOT

Pour passer l'écran d'avertissement, appuyez sur le bouton COULEUR pour activer le MODE LIVE. Vous remarquerez que l'environnement apparaît plus lumineux, plus clair, plus grand, plus proche et meilleur que jamais !

ZOOM

Sur le côté droit, il y a un creux au centre du pavé de commande pour vous aider à déterminer le centre du pavé de commande. Il ne s'agit pas d'un bouton. Faites glisser rapidement votre doigt vers l'avant à partir de l'arrière, c'est un mouvement de "pichenette vers l'avant" pour effectuer un zoom avant. "Un mouvement vers l'arrière permet d'effectuer un zoom arrière.

Remarque : ce glissement d'un doigt ne nécessite pas une forte pression (n'appuyez pas sur le pavé de commande), mais il nécessite des glissements rapides.

LUMINOSITÉ

Balayez vers le haut pour éclaircir, vers le bas pour assombrir. N'oubliez pas de balayer rapidement, un balayage lent n'actionnera pas le pavé de commande.

COULEURS


Le fait d'appuyer sur le bouton COULEUR situé au-dessus du pavé de commande tactile permet de changer de couleur.

LIRE

En appuyant sur le bouton READ situé à l'arrière du bouton COULEUR, vous prendrez une photo de l'imprimé et le lirez à haute voix. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour revenir au MODE LIVE.

MENU DES PARAMÈTRES AVANCÉS

Le menu des paramètres avancés est accessible en appuyant sur le bouton LECTURE pendant 15 secondes jusqu'à ce qu'un carillon retentisse et que l'écran MENU PRINCIPAL s'affiche, comme illustré ici.

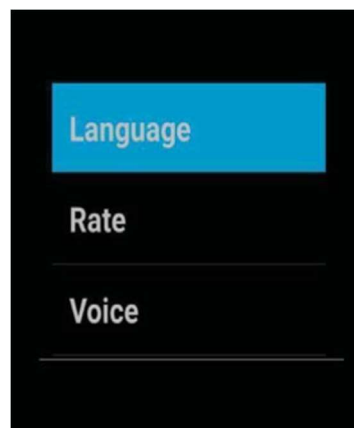


Balayez le PAVE DE COMMANDE TACTILE vers le haut ou vers le bas pour choisir l'option souhaitée, puis sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton LECTURE.



Sous-menu LANGUE



**Sous-menu TAUX
(vitesse de la parole)**

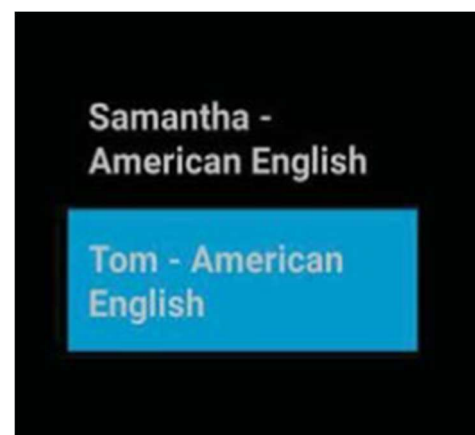


Sous-menu VOIX

REMARQUE : RETOURNEZ AU MENU PRÉCÉDENT EN APPUYANT SUR LA TOUCHE COULEURS. UNE PRESSION RÉPÉTÉE SUR LA TOUCHE COULEUR PERMET DE QUITTER COMPLÈTEMENT LE MENU. LES CHANGEMENTS EFFECTUÉS SONT AUTOMATIQUÉMENT SAUVEGARDÉS.

Sous-menu MODE BORD

Cette section du menu vous permet d'ajouter ou de supprimer certains modes de couleur lorsque vous utilisez le VIEWPOINT Patriot. Les modes de couleur de ce menu définissent les contours des lettres, des objets et des personnes, ce qui permet de mieux voir ! Il existe des cases à cocher pour chaque mode de couleur de contour. Sélectionnez-les en balayant vers le haut ou vers le bas sur le PAVE DE COMMANDE TACTILE et appuyez sur le bouton LECTURE pour sélectionner les couleurs du mode que vous souhaitez activer ou désactiver. Le bouton COULEUR permet de sortir de ce menu.

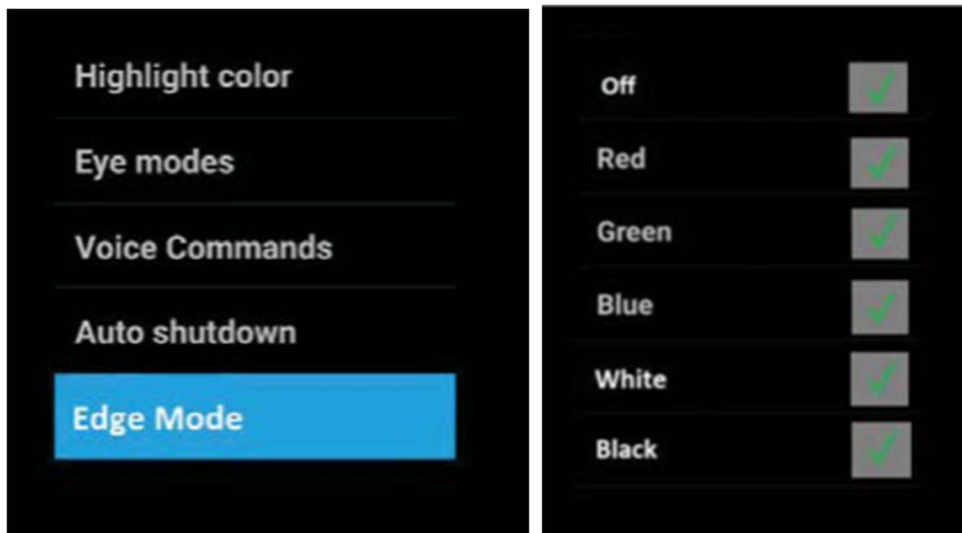

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Taille en cm : 17.78 x 10.16 x 7.62
- Champ de vision de 101 degrés (le plus large au monde)
- 2960 x 1440 pixels Super AMOLED
- Pixels par pouce (PPI) 570
- Poids : 1,2 livres
- Appareil photo de 12 mégapixels (f/1,7, 26 mm, 1/2,5", 1,4 µm, Dual Pixel PDAF), autofocus à détection de phase, OIS, détection des visages et des sourires, HDR automatique, panorama.
- Batterie 3400 mAh, 3,8 volts, Lithium Ion
- Processeur octa-core de 2,7 gigaoctets
- Système d'exploitation Android 9.0 ou supérieur
- Capteur de proximité
- Accéléromètre
- Capteur de lumière ambiante
- Gyroscope
- Couverture de la distance interpupillaire 54-70mm
- Molette de réglage de la mise au point
- Sangles transversales réglables
- Suite patriotique de logiciels adaptatifs et augmentatifs avec points de geste intégrés, grossissement, amélioration des polices de caractères numériques et optiques, enveloppement de mots, synthétiseur vocal numérique, reconnaissance intelligente de caractères pour la conversion à la parole.
- Logiciel propriétaire personnalisé pour les contrôles des fonctionnalités d'alimentation pour le guidage et le logiciel de gestion opérationnelle de la batterie
- Durée de fonctionnement de la batterie : Dépend du niveau de luminosité. Pleine luminosité = environ 1 heure d'utilisation

- **Garantie de deux ans**

Instructions de nettoyage pour votre Patriot VIEWPOINT

:

Chiffon en microfibre

Votre meilleur ami pour garder votre Patriot VIEWPOINT propre est un chiffon en microfibres. La plupart des casques étant constitués d'une combinaison de plastique et de tissu, un simple coup de chiffon suffit souvent à éliminer le plus gros de la poussière ou de la saleté. Il vous suffit d'essuyer votre casque en accordant une attention particulière aux orifices d'aération, aux fentes et aux ports. C'est là que la poussière va se cacher, mais votre chiffon en microfibres devrait les ramasser sans trop de problème.

Air comprimé

La poussière et les poils peuvent se loger dans n'importe quelle fente sans aucune aide. Personne n'a envie de mettre son casque et de se rendre compte que des poils de chien sont coincés dans les lentilles. En gardant une bombe d'air comprimé à portée de main, vous pouvez vous assurer que rien ne reste coincé dans votre casque. Tout ce que vous avez à faire, c'est de pointer la buse d'air comprimé à environ 15 cm de la poussière et d'exercer une brève pression sur le contrôleur. Cela devrait permettre de déloger facilement tout ce qui est coincé et de s'assurer que vous ne touchez pas ou n'étalez pas accidentellement quelque chose sur les lentilles de votre casque.

Rangez-la

L'un des principaux problèmes liés à la conservation de votre casque est d'éviter la poussière et les débris. C'est pourquoi nous vous conseillons de ranger votre casque dans un endroit sûr qui ne vous gêne pas lorsque vous ne l'utilisez pas. La poussière,

les poils d'animaux et autres détritiques peuvent facilement se déposer sur ou à l'intérieur de votre casque lorsqu'il n'est pas utilisé. Il est particulièrement important de garder votre casque en hauteur sur une étagère ou dans son étui pour le ranger. En gardant votre casque rangé et à l'écart, vous pouvez vous assurer que la poussière qui s'accumule le fera à un rythme beaucoup plus lent.

Environnement d'utilisation optimale de la batterie

Le Patriot VIEWPOINT est conçu pour fonctionner de manière optimale à une température comprise entre 0 et 35 °C (32 et 95 °F).

L'utilisation ou la charge continue à des températures extrêmes peut accélérer la détérioration de la batterie.

Une exposition temporaire à des températures extrêmes activera les protections de l'appareil pour minimiser les dommages, et la charge sera limitée pour protéger la batterie de la surchauffe.

Exemples

N'utilisez pas ou ne placez pas votre appareil dans des environnements chauds, comme une voiture chaude, pendant des périodes prolongées.

Ne placez pas ou ne stockez pas votre appareil dans des environnements froids, comme des températures inférieures à zéro.

CONTACTEZ-NOUS

Vous pouvez contacter votre revendeur local agréé Patriot à l'adresse suivante

Accessolutions

170 RUE RAYMOND LOSSERAND

75014 PARIS

Tél : 01 43 44 02 02

Courriel : relation.client@accessolutions.fr

Site web : accessolutions.fr



Patriot® et Magnifying America® sont des marques déposées de Low VisionAids, Inc. Patriot Vision Industries, LLC est un fabricant affilié à Low VisionAids, Inc.

Google® est une marque déposée de Google, Inc.

Samsung® est une marque déposée de Samsung, Inc.

Ce manuel est © Copyrighted 2020. Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale est strictement interdite. La copie ou l'utilisation sans l'autorisation écrite expresse du détenteur de la marque ou des droits d'auteur constitue une violation de la réglementation fédérale sur les marques. Tous les droits sont réservés.