

MISE EN MARCHÉ / MISE EN VEILLE

Si l'Arc-Vision est éteint : Maintenez appuyé 5 secondes sur le **Bouton 1** du casque, le casque va vibrer et après 1 minute, l'Arc-Vision démarre.

Si L'Arc-Vision est en veille : Appuyer une fois sur le **Bouton 1**. Si rien ne se passe, branchez votre appareil, attendez 20 minutes et réessayez.

Mettre en veille l'Arc-Vision : Appuyez sur le **Bouton 1** une fois, l'écran s'éteint, l'appareil est mit en veille

L'Arc Vision reste en veille pour une utilisation plus rapide. Si l'Arc Vision est éteint, il lui faudra environ une minute trente pour que le système soit prêt à fonctionner, alors que la sortie de veille se fait en quelques secondes.



Le casque USB C n'est pas fourni avec l'Arc Vision.

POUR CHARGER L'ARC-VISION

Utilisez le câble USB C et le chargeur fourni. Le cordon est à introduire sur le côté de la lunette (voir figure ci-dessus). Le temps de charge est de 3 heures. Le temps d'utilisation de l'Arc-Vision est de 3 heures environ.

Un signal sonore vous prévient que l'appareil se charge lorsque celui-ci est en veille, mais si il est complètement éteint, il n'y aura qu'un fond noir à l'écran avec un cercle indiquant que l'appareil est en chargement.

L'Arc-Vision ne s'arrête pas, il se met en veille, il s'arrête seulement si il n'a plus de batterie.

RÉGLAGES ET FONCTIONNALITÉS

Modifier le volume de la voix :

Appuyez simultanément sur le **Bouton 3 puis 2** en commençant par le **Bouton 3**, une annonce vocale vous signalera que vous êtes en mode volume.

Appuyez sur le **Bouton volume +** pour augmenter le son. Appuyez sur le **Bouton volume -** pour diminuer le son.

Après votre réglage, attendez 3 secondes et vous repassez en mode zoom.

Grossissement : Restez appuyer sur le **Bouton 3** pour grossir, relâchez le **Bouton 3** quand le grossissement vous convient.

Restez appuyer sur le **Bouton 2** pour diminuer le grossissement, relâchez le **Bouton 2** quand le grossissement vous convient.

Changer les fonds de couleur :

Appuyez 3 fois sur le **Bouton 2** pour changer de mode de couleur (naturel, noir sur blanc et blanc sur noir).

Lancer la reconnaissance de caractères :

Appuyez 2 fois sur le **Bouton 3** pour lire le texte à haute voix.

Lecture mise en pause :

Appuyez 2 fois sur le **Bouton 2** pour mettre en pause la lecture.

Commandes vocales :

Pour commander le casque vocalement, il faut appuyer sur le **Bouton 2** deux fois, un bip retentit, et vous énoncez la commande à voix haute.

Les mots clés :

- « **Couleur** » Change le mode de couleur
- « Lumière allumée » Allumer la lumière
- « Lumière éteinte » Eteindre la lumière
- « Batterie » Annonce le niveau de batterie
- « Plus grand » Grossit l'image
- « Plus petit » Diminue l'image
- « Texte » Lit le texte à haute voix
- « Texte ligne » Lit le texte à haute voix en ligne
- « **Lecture** » Reprend la lecture
- « Avance » Avance le texte d'une ligne
- « Arrière » Recule le texte d'une ligne
- « Plus rapide » Augmente la vitesse de lecture
- « **Plus lent** » Baisse la vitesse de lecture
- « Monte le volume » augmente le volume
- « Baisse le volume » diminue le volume

Résolution de problèmes :

1) Avant toute manipulation vérifiez bien que votre appareil soit bien chargé et allumé

Appuyez sur le **Bouton 1** rapidement pour voir si l'écran s'allume. S'il s'allume, passez à l'étape 2, sinon démarrez le en appuyant 5 secondes sur le **Bouton 1**. Si l'Arc-Vision ne démarre pas, chargez le pendant 3h, et redémarrez-le.

2) Si l'ARC-Vision ne se charge pas

Vérifiez bien que le cordon soit bien branché à la prise de courant. Si l'Arc-Vision ne parle pas lorsque vous le branchez, vérifiez bien qu'il soit allumé.

La lunette ARC Vision ne doit pas être utilisée pour conduire, il est interdit de conduire avec ce type d'équipement.

Pour toute question ou problème veuillez vous adresser à votre revendeur.

Série n°:

