

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour assurer le grossissement de l'image

Pour une utilisation optimale des lunettes et du logiciel Magic Sight, l'utilisation de la télécommande est indispensable.

Les 2 gâchettes situées à l'arrière de la télécommande permettent de faire varier la taille de l'image, du texte ou de l'objet ciblé afin d'assurer une meilleure reconnaissance de ce dernier.

La gâchette inférieure permet d'agrandir l'image tandis que la gâchette supérieure permet de réduire la taille de l'image.

Le bouton «Pause» situé sur le devant de la télécommande, légèrement bombé, permet d'activer et de désactiver le mode pause des lunettes.



○ — Gâchette de Zoom arrière

○ — Gâchette de Zoom avant

Il est recommandé de presser les gâchettes par pressions successives plutôt que par des appuis longs permettant ainsi une transition douce entre différents niveaux de grossissement.

Bouton Pause



Si vous rencontrez des difficultés, contactez les équipes techniques Magic Sight.

Nous sommes à votre disposition pour vous assister et répondre à toutes vos questions.

Contact

contact@magicsight.io
www.magicsight.io



MAGIC SIGHT

GUIDE d'utilisation

1 LANCEMENT DE MAGIC SIGHT

Après avoir procédé à la mise en place de l'unité centrale et du casque, vous pourrez lancer le logiciel Magic Sight :

- 1 Démarrez l'unité centrale
- 2 Démarrez la télécommande via le bouton Accueil

Lors du démarrage des lunettes, le logo Magic Sight apparaît pendant quelques secondes puis la vision de votre environnement commence.

 **MAGIC SIGHT**

2 MISE EN CHARGE DES LUNETTES

ET DE LA TÉLÉCOMMANDE

Afin d'assurer la mise en charge des lunettes et télécommande, veuillez toujours utiliser les câbles USB-C, chargeurs et câbles d'alimentation fournis dans le pack Magic Sight.

Les lunettes et télécommande disposent chacune d'un port USB-C permettant la connexion aux câbles USB-C fournis sans orientation précise à respecter. Les voyants présents sur l'unité centrale permettent de connaître le niveau d'avancement de la charge.



3 CONNEXION ENTRE LES LUNETTES

ET LA TÉLÉCOMMANDE

Si, lors de l'utilisation de vos lunettes, la télécommande ne répond plus lorsque vous pressez les différentes gâchettes :

- 1 Assurez vous que la télécommande est suffisamment chargée. Procédez à la charge de cette dernière au besoin via les câbles fournis à cet effet.
- 2 En maintenant les lunettes allumées, pressez durant 3 secondes le bouton d'accueil de la télécommande puis relâchez. Un son vous permettra de vous assurer que la télécommande est bien démarrée. La télécommande se reconnectera automatiquement à vos lunettes après quelques secondes.

4 CONNEXION AU WIFI

Si vos lunettes n'ont pas été pré-connectées à votre réseau WIFI, rendez-vous sur cette page de notre site internet pour les instructions de connexion : www.magicsight.io/wifi

